



APLICACIÓN
GUÍA DEL USUARIO



 Android

 App Store

La función principal de la aplicación SOUNDWEAR es personalizar la configuración del perfil preferido por el usuario que proporcionará una experiencia auditiva cómoda y en forma.

NOTA: Debido a las mejoras realizadas en la aplicación a lo largo del tiempo, es posible que su aplicación se vea y actúe de manera diferente a como se muestra en este manual. Si este es el caso, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación.

ANTES DE EMPEZAR:

Asegúrate de esto:

- El Bluetooth en su teléfono inteligente deberá de estar encendido.
- Encienda su solución auditiva con la carga completa.
- Su aparato auditivo deberá de estar a menos de 5 pasos de su teléfono inteligente.
- Solo disponible en iOS 9 o posterior, iPhone 5 o posterior; Android 6 o posterior, tamaño de pantalla de 4" o superior.

OPCIÓN 1:

Visite y busque en la tienda de aplicaciones o GooglePlay.



OPCIÓN 2:

Abra la cámara de su teléfono inteligente.

Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación.



NOTA: PARA IOS 9 O POSTERIOR, IPHONE 5 O SUPERIOR ;ANDROID 6.0 O POSTERIOR.

CONECTA LA APLICACIÓN

HABILITA EL BLUETOOTH


Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado en su teléfono inteligente antes de abrir la aplicación.

OPCIÓN 1:

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir el mando de control y toque el icono de Bluetooth  (Para iOS)

OPCIÓN 2:


Compruebe la opción de menú "Bluetooth" en "Configuración".

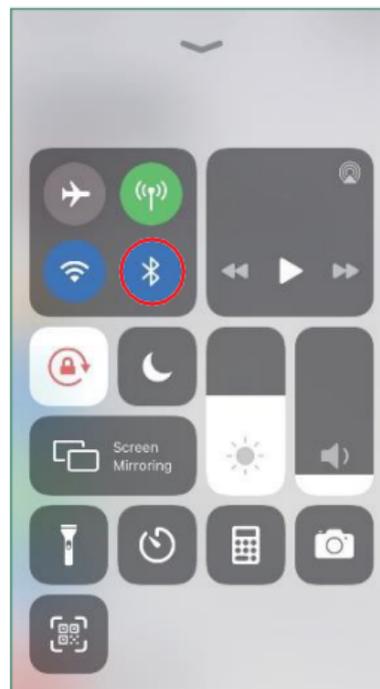

CONECTA LA APLICACIÓN

ACERCA DE LOS DIFERENTES ESTILOS:

Para los usuarios que están acostumbrados a la versión 1.x, aún pueden elegir la versión de estilo antiguo similar a la original.)

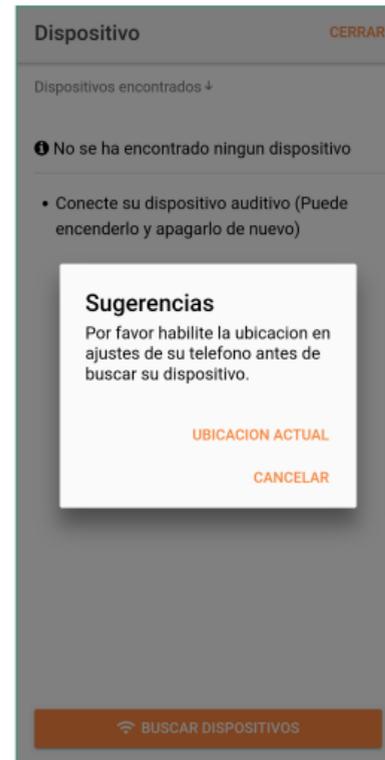

CONECTA LA APLICACIÓN

BUSCAR

Busque el dispositivo siguiendo los pasos.



CONECTAR

Conecte los dispositivos uno por uno de forma apropiada para sus oídos.

MÁS AJUSTES

Puede realizar algunos ajustes más seleccionando  en el extremo derecho del dispositivo conectado.


AVISO: Los modelos que se muestran en la fotografía son modelos de demostración.

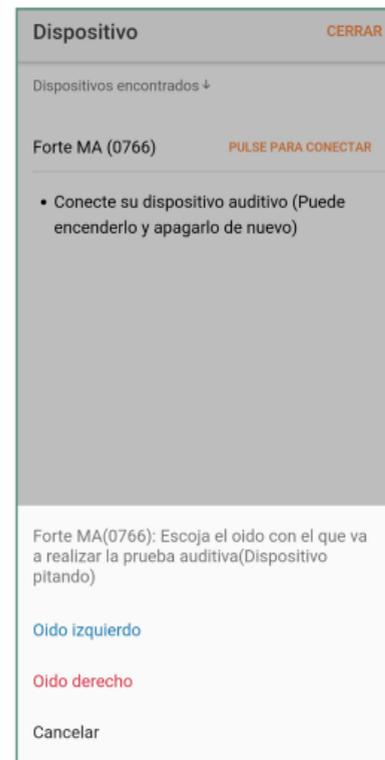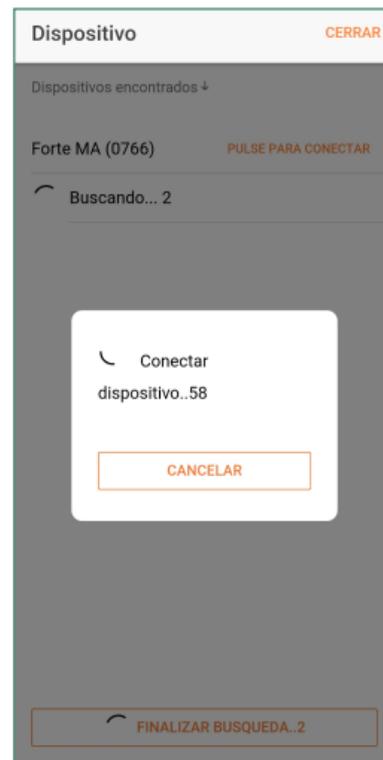

CONFIGURACIÓN ON/OFF

CONECTAR

Seleccione el dispositivo correspondiente para encenderlo / apagarlo deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda. (Disponible para algunos modelos).

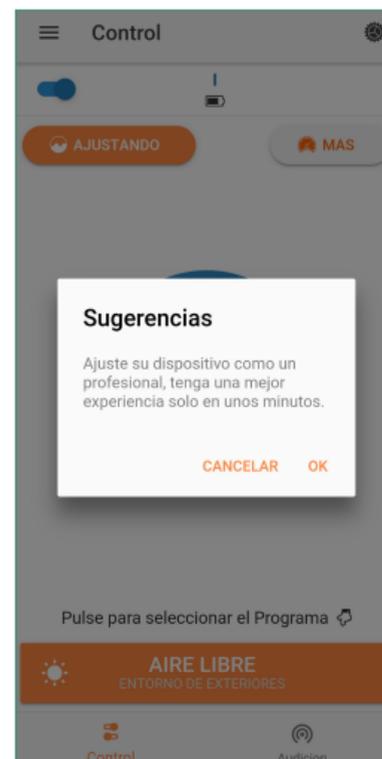

ADECUADO

Puede elegir el ajuste que se adapte mejor a su solución auditiva usted mismo.

SUGERENCIAS: puede optar por experimentar la configuración original primero y realizar una la verificación auditiva más tarde.

Busque un lugar tranquilo para realizar la comprobación de ajuste del aparato o prueba de audición.

Antes de empezar (1/2) CERRAR

 **Realice el test en un entorno tranquilo**

Para conseguir un resultado optimo, busque un entorno tranquilo

57

Nivel de ruido actual (dB)



[→ CONTINUAR](#)

Antes de empezar (2/2) CERRAR

 **Comenzar**

Tras los ajustes realizados sonara un pitido con diferentes opciones, escoja uno acorde a lo que escucha.






- Los ajustes seran procesados para su oido izquierdo
- Señale "si" si usted oye un pitido muy suave.

[→ CONTINUAR](#)

ADECUADO



Siga los pasos de guía de la aplicación y confirme el tono de referencia activo en cada prueba de frecuencia.

Confirma "Sí" o "No" en todas las pruebas frecuencia.

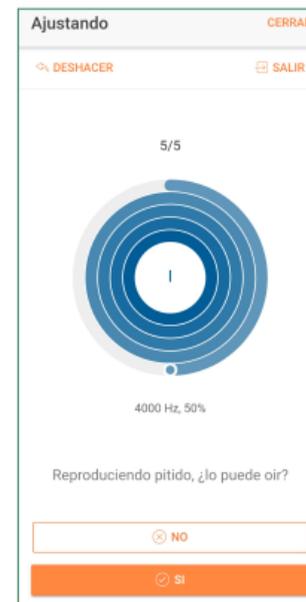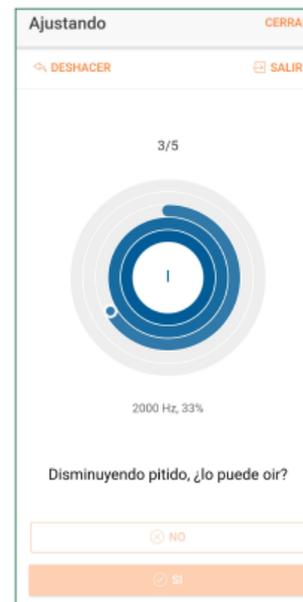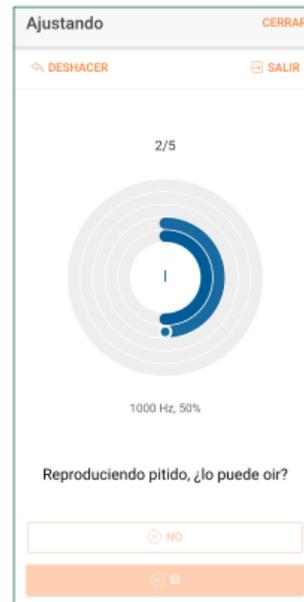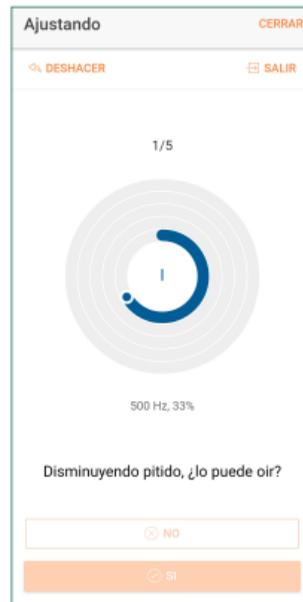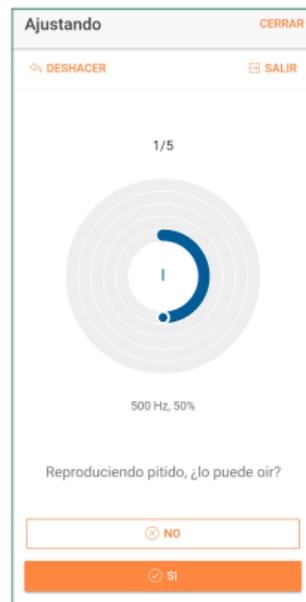



CONTROL DE AUDICIÓN

Una vez que haya terminado de ajustarlo, la aplicación le mostrará el resultado de la audición.

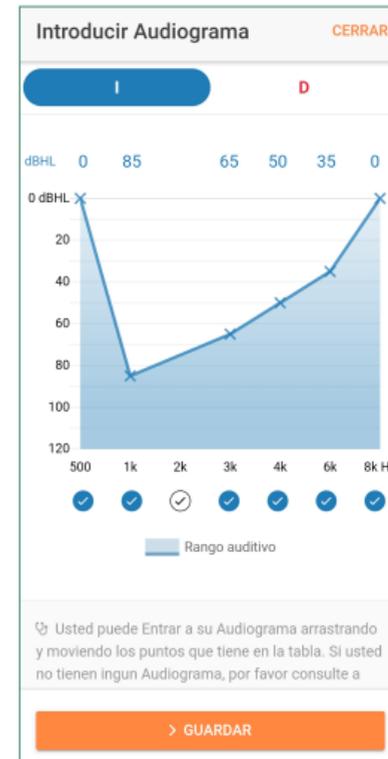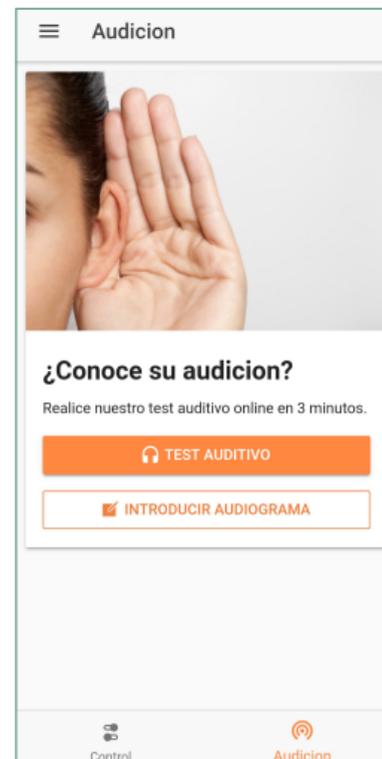

CONTROL DE AUDICIÓN

Puede utilizar su resultado de audición para volver a ajustar su dispositivo siguiendo los pasos.

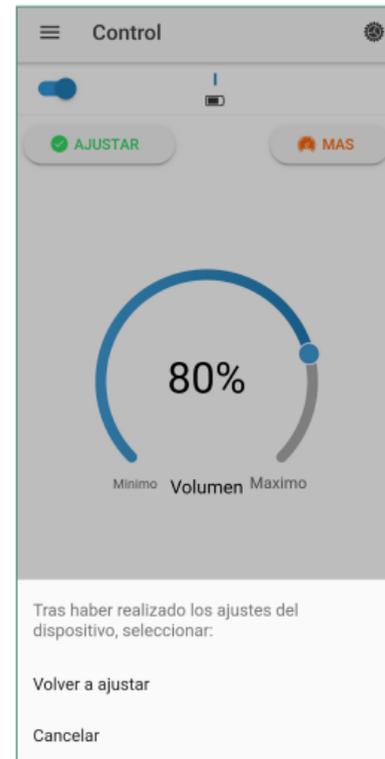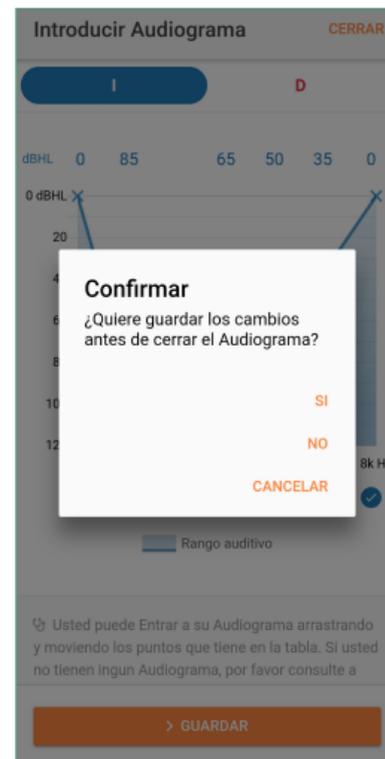


CONTROL DE SONIDO

Ajusta tu configuración de sonido tocando el botón control  en la parte inferior izquierda de la pantalla de su página principal. Desde aquí puede ajustar Modo / Programas, Volumen y Banda.

MODO / PROGRAMAS

Elija el modo de audición de acuerdo a sus necesidades en la aplicación tocando el programa. Función preestablecida de la aplicación para cambiar los instrumentos izquierdo y derecho juntos.

SUGERENCIAS: El interruptor de memoria en los dispositivos le permite cambiar el modo individualmente.

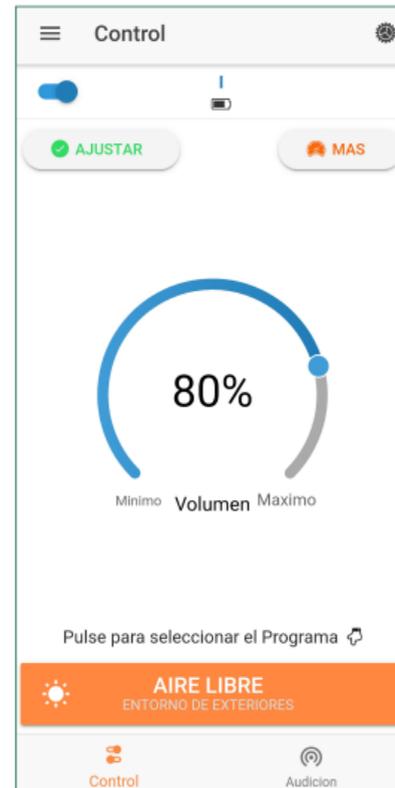

CONTROL

VOLUMEN

Controle el volumen de sus aparatos auditivos arrastrándolos alrededor del círculo. Ambos instrumentos se pueden ajustar juntos al mismo nivel seleccionando un enlace , o independientemente por desvincularlo. .





CONTROL

AJUSTE

Ajuste sus bandas tocando el botón de banda y arrastrando los controles deslizantes en la frecuencia adecuada.

En la función BAND puede personalizar la amplificación del sonido en una variedad de frecuencias. Con la función COMPRESS puede cambiar el sonido de un tono a otro para hacer que los sonidos del habla sean más audibles.

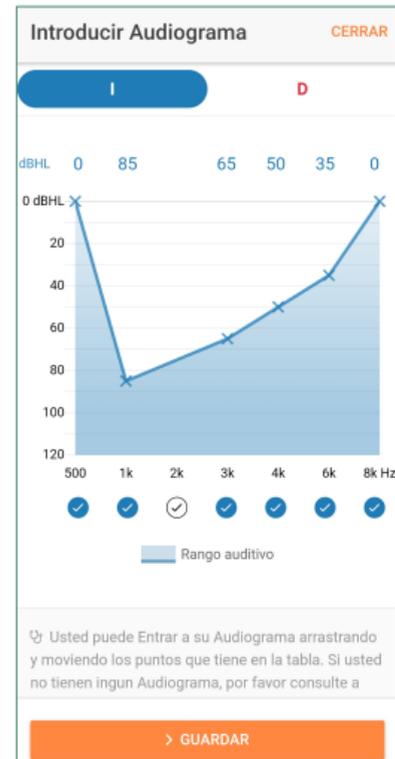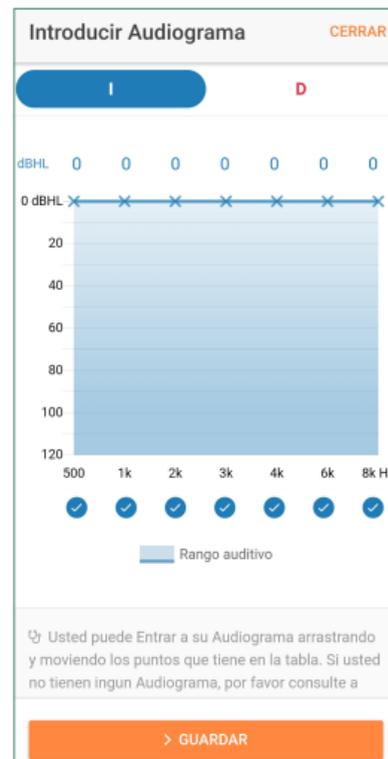

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ASUNTO	SOLUCIÓN APLICABLE
Problemas técnicos con el dispositivo inteligente	Reinicie el dispositivo inteligente
Incompatibilidad entre aplicaciones y dispositivos inteligentes	Verifique la versión del sistema operativo iOS / Android
Aplicación desactualizada	Actualizar la aplicación con la versión más reciente
Inserción incorrecta de la batería	Vuelva a insertar o reemplace con unabatería nueva
Causa / razón del fallo desconocido / indeterminado	Póngase en contacto con el proveedor del instrumento, donde se compró el aparato.